



DRIVESAFE™

ALKOHOLIMITTARI



ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

KÄYTTÖOPAS

Kiitos ostoksestasi. DRIVESAFE-alkoholimittari mittaa alkoholin tason ihmisen hengityksestä. Ostokseksi on osoitus siitä, että kannat huolta alkoholinkäyttöön liittyvistä riskeistä.

Alueellasi olevista laeista riippuen DRIVESAFE toimitetaan ennakolta asetetuin tasoin, jotka osoittavat, katsotaanko alkoholin puhallustulos epäonnistuneeksi (punainen taustavalo), varoitukseksi (ruskeankeltainen taustavalo) tai läpäistyksi (vihreä taustavalo).

Huomautus: *Voi kestää tunnin alkoholin nauttimisesta, ennen kuin alkoholi on täysin imeytynyt.*

TURVALLISUUS JA VAROTOIMET

- Ryhdy seuraaviin varotoimiin varmistaaksesi mittarisi joustavan ja keskeytymättömän toiminnan:
- Käytä tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen.
- Käytä ainoastaan AA-alkaliparistoja.
- Älä varastoi sitä erittäin korkeisiin tai mataliin lämpötiloihin ja vältä jättämästä DRIVESAFE suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.
- Älä puhalla savua tai mitään nesteitä suukappaleeseen, sillä ne voivat vahingoittaa sensoria.
- Älä avaa koteloa. Sen avaaminen mitätöi takuun ja voi myös vahingoittaa sisällä olevia komponentteja.
- Pidä kaikki magneetit ja lähettävät laitteet (kuten kannettavat puhelimet) poissa mittarista radiotaajuuksisen interferenssin minimoimiseksi.
- Mittarin ympäröivä lämpötila on 0°C - +50°C.

TAKUU

Kaikkien ACS-tuotteiden taataan olevan valmistus- ja materiaalivikoja yhden vuoden ajan toimituksesta.

ACS suostuu vaihtavansa tai korjaavansa viallisen alkoholimittarin sillä edellytyksellä, että vikaa ei aiheuttanut väärä käyttö tai väärä käsittely.

Alkoholimittarit, jotka palautetaan takuukorjauksia varten, on pakattava asianmukaisesti ja toimitettava ennakolta maksettuna valtuutetulle palveluntarjoajalle.

Palvelutiedustelujen yhteystiedot:

Sähköposti: service@acs-corp.com

Verkkosivusto: www.acs-corp.com

Maksuton puhelinnumero: 1-416-619-3500

HUOLTO

Puhdista mittarisi kostealla liinalla ja miedolla saippualla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Säilytä kuivassa paikassa ja vältä äärimmäisiä lämpötiloja.

DRIVESAFE edellyttää kausihuoltoa ja kalibrointia. On suositeltavaa kalibroida mittari kerran vuodessa tai 5 000 testin jälkeen sen mukaan, kumpi tulee aikaisemmin. Kalibrointi on annettava valtuutetun huoltohenkilökunnan suoritettavaksi. Näytössä vilkkuu **CAL**-viesti, kun mittari tarvitsee kalibrointia. Mittarin kalibroinnin laiminlyönti voi aiheuttaa virheellisiä lukemia.

SISÄLTÖ

Aloitus	1
Virta päällä/Virta pois.....	2
Paristo.....	2
Puhalluskokeen suorittaminen	3
Vianetsintä	5
Luettelo	6

ALOITUS

DRIVESAFE on henkilökohtainen alkoholimittari, joka on tarkka ja helppokäyttöinen. Se mittaa hengityksen alkoholipitoisuuden (BrAC), joka on suoraan verrannollinen veren alkoholipitoisuuteen (BAC). DRIVESAFE on ainoastaan yksi painike, minkä vuoksi se on erittäin helppokäyttöinen.

Tässä jaksossa tutustut alkoholimittarin osiin ja perusominaisuuksiin.



VIRTA PÄÄLLÄ/VIRTA POIS

Paina Virta-painiketta kerran virran kytkemiseksi DRIVERSAFE. Mittarin käynnistyessä näet vilkkuvan WAIT-viestin näytöllä (noin 3 sekuntia). Vihreä taustavalon ja näytöllä oleva **READY**-viesti osoittaa, että mittari on valmis käyttöön.

Mittari sulkeutuu automaattisesti ollessaan toimettomana 45 sekuntia. Voit katkaista virran manuaalisesti painamalla painiketta nopeasti kaksi kertaa.

Voit panna DRIVESAFE virran päälle ensimmäistä kertaa vetämällä paristolokeron muovikielekkeestä. Sinun ei tarvitse avata kantta kielekkeen poistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: *Katkaise mittarista virta ennen kuin poistat akut, koska se voi vaikuttaa kalibrointiin.*

PARISTO


Mittari tarvitsee toimiakseen kaksi "AA" alkaliparistoa. Pane ne laitteeseen poistamalla takakannen nostaen se ylös. Mittari voi suorittaa 1000 testia uusilla paristoilla. Näytön oikeassa alakulmassa oleva osoitin osoittaa jäljellä olevan paristojen iän.

Kun näytöllä oleva pariston osoitin alkaa vilkkua, sinun on vaihdettava paristot.

Voit kuitenkin jatkaa mittarin käyttämistä. Jos näet **E01**-virheviestin, sinun on vaihdettava paristot, ennen kuin voit suorittaa uuden puhalluskokeen.

PUHALLUSKOKKEEN SUORITTAMINEN

Huomautus: Jotkin asiat, kuten juominen tai tupakointi, voivat vääristää alkoholimittarin lukemia. On suositeltavaa huuhdella suusi tai odottaa ainakin 20 minuuttia ennen testiä.

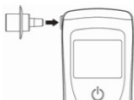

1. Liitä suukappale DRIVESAFE. Voit varmistaa tarkat tulokset käyttäen uutta suukappaletta joka kerran. Käytetty suukappale voi olla likaantunut edellisistä testeistä, mikä voi aiheuttaa virheellisiä lukemia.

2. Pane mittariin virta painamalla painiketta. Näet vilkkuvan **WAIT**-viestin, kun mittari käynnistyy. **READY**-viesti näytöllä osoittaa, että mittari on valmiina.

3. Vedä syvään henkeä ja puhalla suukappaleeseen kohtuullisen voimakkaasti sekä tasaisella nopeudella ja paineella. Sinun on kuultava jatkuva piippausääni, mikä osoittaa puhalluksen olevan asianmukainen.



Huomautus: Jos puhallusnäyte katkeilee tai se on liian kova tai liian heikko, kuulet kaksi piippausääntä ja näytöllä on **ABORT**-viesti. Odota **READY**-viestiä ja puhalla uudestaan.

4. Lakkaa puhaltamasta, kun kuulet napsautuksen ja ääni lakkaa (noin 5 sekunnin kuluttua). Tämä osoittaa, että näyteprosessi on suoritettu loppuun.



5. Mittari analysoi ja näyttää tulokset. Kuluva aika (muutama sekunti) riippuu puhallusnäytteessä olevasta alkoholimäärästä ja ilman lämpötilasta.

VIANETSINTÄ

JOS MITTARI:	SILLOIN:	KATSO:
Ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none">• Jos käytät sitä ensimmäistä kertaa, poista pieni muovikieleke paristolokerosta• Vaihda paristot	Sivu 1, 2
näyttää poikkeavia tuloksia	<ul style="list-style-type: none">• Vaihda suukappale. Käytä osanumeroa 95-000145 tilatessasi lisää suukappaleita ACS:ltä• Tarkasta, vilkkuuko CAL-viesti näytöllä. Tämä osoittaa, että laite on kalibroitava. Vaikka voit jatkaa mittarin käyttämistä, on erittäin suositeltavaa lähettää mittari heti kalibroitavaksi• Jos olet syönyt tai tupakoinut ennen testiä, huuhtelee suusi tai odota vähintään 20 minuuttia ja toista testi	Sivu i, ii, 3
CAL vilkkuu näytöllä	<ul style="list-style-type: none">• DRIVESAFE tarvitsee kalibroitua. Ota yhteys huoltokeskukseen• DRIVESAFE on kalibroitava joka vuosi ensimmäisestä käyttöpäivämäärästä tai 5000 testin välein• Voit nähdä, että CAL vilkkuu, vaikka mittari ei kaipaa kalibroitua, jos poistat paristot katkaisemalla mittarista virtaa	Sivu ii, 2
Tukkeutunut tai liikainen suukappale	<ul style="list-style-type: none">• Vaihda suukappale• Käytä osanumeroa 95-000145 tilatessasi lisää suukappaleita ACS:ltä	Sivu 3
Näyttää virhekoodia E01	<ul style="list-style-type: none">• Vaihda paristot. Mittari ei siirry valmiustilaan, ellei paristoja vaihdeta	Sivu 2
Näyttää näitä virhekoodeja: E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08	<ul style="list-style-type: none">• Nämä virheet voivat esiintyä käynnistyksen aikana ja osoittavat, että mittari kaipaa huoltoa. Saat tietoja palauttamismenettelystä ottamalla yhteyden ACS:een	Sivu ii

LUETTELO

Aloitus	1
BAC	1
BrAC.....	1
Huolto.....	iii
Osanumero	5
Paristo.....	2
Takuu	iii
Testaus.....	3
Virta.....	2
päällä	2
pois	2



60-000284-A
Copyright © 2011